



Parkinson rollators

Cor Adriaanse – Clinical Specialist - Rollz
Michelle Mordant – Ergotherapeut - Medicura
Harry Custers – Accountmanager - Medicura



Inhoudsopgave

- Indicatie, zorgverzekeraar en aanvraagprocedure
- Reden keuze inzet Parkinson Rollator
- Parkinson Rollator merken
 - Gemino 30
 - Fellowroll
 - uMotion
 - Rollz Motion
- Keuzehulp Parkinson Rollator
- Andere geschikte rollators: ErgoPrimo
- Kooprollators



Parkinsonrollator

Indicatie



Complex loophulpmiddel en mag worden ingezet bij mensen met **Parkinson of parkinsonisme** waarbij een eenvoudig loophulpmiddel niet volstaat. Meerdere functies/cue's zijn noodzakelijk om freezing/festinatie te doorbreken

Medicura is gecontracteerde leverancier van alle zorgverzekeraars – **100% vergoeding basisverzekering**

Aanvraag:

- Door **zorgprofessional** → Ergotherapeut of fysiotherapeut doet bij Medicura een aanvraag via speciaal aanvraagformulier of met een uitgebreid verslag
- **Verwijsbrief** van (huis) arts

Inzet depot:

Bij **CZ** wordt er gewerkt vanuit een depot.
Bij **ONVZ** hebben wij een machtiging nodig vanuit de zorgverzekeraar.
Bij **overige zorgverzekeraars** wordt er gewerkt vanuit ons eigen depot.

Betreft langdurige **uitleen/bruikleen** en blijft dus eigendom van Medicura
Extra accessoires zoals stokhouder en rugsteun wordt niet vergoed

Wat is Freezing en Festinatie

Freezing: 'het bevroren van lopen' is een veelvoorkomend symptoom van de ziekte van Parkinson en wordt ook wel beschreven als 'het gevoel dat de voeten aan de grond vastgeplakt zitten', voor enkele seconden of zelfs minuten.



Het bevroren van lopen treedt vaak op bij:

- starten van lopen, het
- lopen door een deur
- tijdens het draaien
- uitvoeren van dubbeltaken (praten tijdens het lopen)
- bereiken van een open ruimte of een doel
- lopen in het donker.

Festinatie: De persoon gaat steeds sneller lopen en met steeds kleinere passen. Zwaartepunt ligt voor de voeten.

Mensen met de Ziekte van Parkinson verliezen dopamine neuronen in een gebied van de hersenen waar geautomatiseerd gedrag wordt aangestuurd. Om freezing te omzeilen, moeten patiënten hun hersenen uitdagen om **creatieve omweggetjes** te vinden. En niet te vervallen hun oude looppatroon.

Trucjes om freezing te omzeilen!

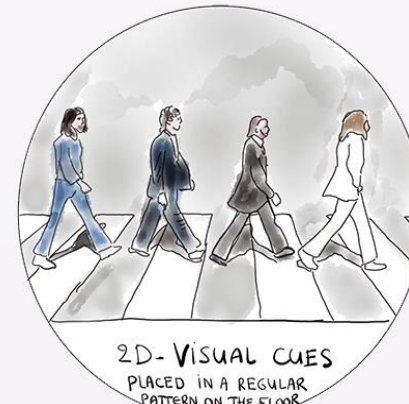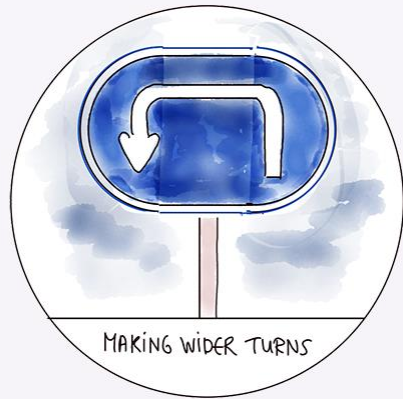

Reden keuze inzet Parkinsonrollator

Belangrijkste reden voor inzet van de verschillende functies

- **Laserlijn** stimuleert de loopbeweging wanneer er freezing ontstaat.
- **Metronoom** en **vibratie** in de handvatten stimuleren een looppatroon.
- **Sleeprem**: Voor cliënten waarbij de rollator te snel gaat voor hun looppas.
- **Omgekeerd remsysteem**, kan zorgen voor extra veiligheid wanneer mensen de rollator plotseling los laten, niet op de rem zetten, kan zorgen voor bewuster lopen omdat mensen niet gewend zijn om een rem in te knijpen.
- **Lichtgewicht rollator** wanneer de rollator veel moet worden meegenomen in de auto
(Bij voorkeur niet inzetten bij lange mensen, ervaring geeft aan dat dit een stuk instabieler voelt dan de overige rollators)
- **Eenhandige rembediening** (verminderde handfunctie)
- **Onderarmschalen**: wanneer de cliënt weinig kracht/ veel pijnklachten heeft in uw armen, handen en polsen waardoor het steunen op een de normale handvatten niet meer mogelijk is.

Parkinson Rollator

Varianten

- Gemino 30



- Fellow Roll



- Rollz Motion Rhythm



- uMotion

Parkinson Rollator

Gemino 30 technische specificaties

- Geschikt tot 150 kg
- Lengte tussen de wielen 150 – 200 cm
- Hoogte handvatten: 80 – 100 cm
- Gewicht rollator: 7,6 kg
- Afstand tussen de wielen achterzijde 45 cm
- Lichtgewicht
- Laser
- Sleeprem
- Omgekeerd remsysteem

Optie:

- Onderarmschalen
- Normaal remsysteem



Parkinson Rollator

Fellow roll standaard

- Geschikt tot 150 kg
- Lengte tussen de 155 – 178 cm
- Hoogte handvatten: 75 – 100 cm
- Gewicht rollator: 8 kg
- Afstand tussen de wielen achterzijde 47 cm
- Standaard remsysteem

Mogelijke opties:

- Laser en metronoom
- Sleepremmen



Parkinson Rollator

Fellow roll High

- Geschikt tot 150 kg
- Lengte tussen de 170 – 200 cm
- Hoogte handvatten: 89 – 108 cm
- Gewicht rollator: 9,8 kg
- Afstand tussen de wielen achterzijde 50 cm
- Standaard remsysteem

Mogelijke opties:

- Laser en metronoom
- Sleepremmen



Parkinson Rollator

uMotion

- Zeer stabiel frame met kleine draaicirkel
 - Geschikt tot 125 kg
 - Lengte tussen de 150 – 195 cm
 - Hoogte handvatten: 83 – 105 cm
 - Gewicht rollator: 9,8 kg
 - Afstand tussen de wielen achterzijde 48 cm
 - Laser
 - Sleepremmen, trapgewijs
-
- Nieuwe model heeft een automatische laser en sleepremmen met draaiknop



Parkinson Rollator

Rollz Motion Rhythm

- Geschikt tot 125 kg
- Lengte tussen de 160 – 190 cm
- Hoogte handvatten: 87 – 105 cm
- Gewicht rollator: 11,6 kg
- Afstand tussen de wielen achterzijde 44 cm
- Laser/metronoom/vibrerende handvatten
- Standaard remsysteem

Optie:

- Sleepremmen
- Rolstoelpakket (zelf door klant bij te kopen)



Keuzehulp Parkinson Rollator

Rollator	Omgekeerd remsysteem	Standaard remsysteem	Eenhandige rem	Tweehandige rem	Lichtgewicht rollator	Sleeprem	Visuele cue (laserlijn)	Auditieve Cue (metronoom)	Sensitieve cue (vibrerende handvaten)	Onderarm-schalen
Gemino 30	X	X		X	X	X	X			X
uMotion	X		X			X	X			
Fellow roll		X		X		X	X	X		
Rollz Motion Rhythm		X		X		X	X	X	X	

ErgoPrimo

Achterwaartse rollator

- Geschikt bij Parkinson bij verminderd loopvermogen en evenwichtsstoornissen
- Heeft geen speciale functies voor freezing/festinitie
- Wordt getrokken i.p.v. geduwd en resulteert in natuurlijke lichaamshouding
- Veilig door omsluitende constructie en zitmogelijkheid
- Standaard remsysteem
- 7,5 kg lichtgewicht en inklapbaar
- Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
- Prijs vanaf €545,-
- Wordt alleen vergoed door CZ, Menzis, ASR, Zorg&Zekerheid, ONVZ, Eucare Uitleenartikel

- Optie:
 - Maat S lichaamslengte 155-185 cm
 - Maat M lichaamslengte 186-192 cm
 - Anti-kiepwieltjes



Geschikte kooprollators

Op bijna alle rollators kan een sleeprem of omgekeerd remsysteem gemonteerd worden

Saljol Carbon lichtgewicht rollator – allround met sleeprem €699

- 5,8 kg
- allround soft banden
- incl. tas



Topro Neuro lichtgewicht met omgekeerd remsysteem €559

- 7,8 kg
- soft banden
- incl. tas



Provo met omgekeerd remsysteem én sleeprem €545

- 10,8 kg, stabiel frame
- soft banden
- incl. boodschappenrekje



Vragen?
Zijn er nog vragen?



Bedankt

voor jullie aandacht!

